

SORBACT® GEL DRESSING

INFEKTIONSFOREBYGGENDE FUGTIGT SÅRKONTAKTLAG


FOREBYGGER OG BEHANDLER SÅRINFEKTION

TILFØRER SÅRET FUGT

REDUCERER DEN MIKROBIELLE BELASTNING

NEM AT BRUGE

HJÆLPER MED OPRENSNING

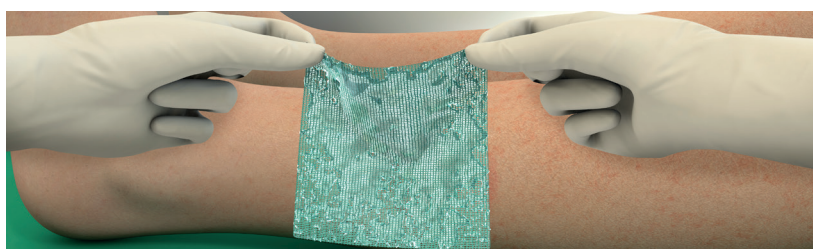

KONTROLLERER MÆNGDEN AF MIKROORGANISMER OG UNDERSTØTTER FUGTIG SÅRHELING

Sorbact® Gel Dressing er en steril gelbandage, der binder bakterier og svamp. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag med en vandbaseret gel indeholdende carbomer og propylenglycol (10%). Sorbact® Gel Dressing tilfører fugt, og giver dermed et fugtigt sårmiljø, som fremmer autolytisk debridering.

Forebygger og behandler sårinfektion

Ved at tage kontrol over mikroorganismene, fremmes den naturlige sårheling, hvorved sårinfektion og forsinket sårheling forhindres.

Tilfører såret fugt

Sorbact® Gel Dressing fremmer sårheling ved at tilføre fugt til tørre sår eller sår med lavt eksudatniveau. Hydrogelen hjælper med opretholdelse af et fugtigt sårmiljø og fremmer den naturlige sårhelingsproces.

Giver fugt til såret

Geler har forskellig evne til at tilføre fugt til såret. Gelen er afgørende for debrideringsevnen i fibinbelagte og nekrotiske sår.

Sorbact® Gel Dressing har en høj fugtgivende evne, hvilket fremmer effektiv autolytisk debridering.

NEM
AT BRUGE



Bandagen tilpasser sig såret, og reducerer risikoen for at bandagen flytter sig.


SORBACT® TEKNOLOGI

Fremmer sårheling

Forhøjede mikrobielle niveauer vil medføre risiko for infektion og forsinket sårheling. Sorbact® reducerer den mikrobielle belastning på en sikker måde og fremmer dermed sårhelingen.

Sådan virker det

Mikroorganismer binder sig til bandagen og fjernes, når denne skiftes. Sorbact® fremmer sårhelingen ved at reducere antallet af mikroorganismer uden at frigive aktive stoffer i såret.

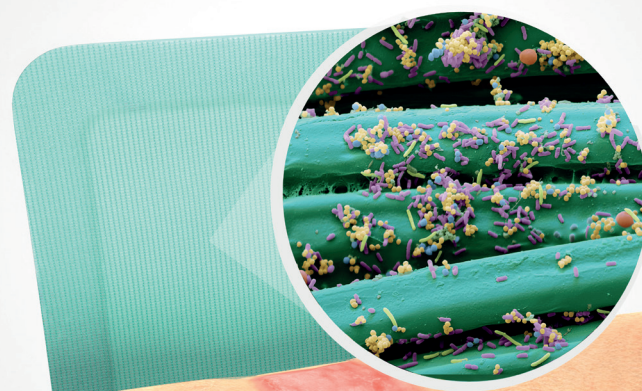

ANVENDELSESOMRÅDER



Kirurgiske/
traumatiske sår



Brandsår



Diabetiske fodsår



Venøse bensår



Tryksår



Cancersår

← Sorbact® Gel Dressing →

Overfladiske sår



Dybe sår

Mindre sår



Store sår

Sorbact® Gel Dressing fås i forskellige størrelser, hvilket gør den velegnet til en lang række sår.

PATIENTJOURNALER – SORBACT® GEL DRESSING

Patient med 3 år gammelt, ikke-helet arteriovenøst sår

Behandling: Sorbact® Gel Dressing og polyuretanskum som sekundærbandage. Bandagen skiftes hver 2. til 3. dag.



DAG 0

Forskellige bandager, herunder sølv, var blevet prøvet i løbet af denne periode. En podning før start med Sorbact® afslørede vækst af *Pseudomonas aeruginosa* og *Klebsiella*.




EFTER 6 UGER

Sorbact® Gel Dressing understøtter fortsat autolytisk debridement af såret. Såret forbedres klinisk, med sundt granulationsvæv og ingen smerte eller sårlugt.

Kvinde med rhabdomyolyse grundet decubitus efter at have ligget på gulvet i to dage

Behandling: En kirurgisk debridement i starten. Sorbact® Gel Dressing med en superabsorbent som sekundærbandage. Bandagen skiftes de første uger dagligt. Herefter ca. hver 3. dag.

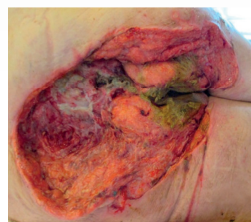

DAG 0

Inficeret, kraftigt eksuderende og ildelugtende sår, 40 x 30 cm.




EFTER 9 UGER

Sorbact® Gel Dressing forhindrede infektion og blev anvendt som primær bandage gennem hele sårhelingsforløbet.

SORBACT® GEL DRESSING

BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.
 2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret.
 3. Tag bandagen ud af posen ved steril teknik.
 4. Ved tilklipning af bandagen skal der anvendes steril teknik. Kassér åbne, ubrugte bandager.
 5. Læg bandagen på. Sørg for, at gelkompressen er i direkte kontakt med hele såret. Bandagen må ikke overlape den raske hud.
 6. Lad altid et stykke af bandagen stikke ud ved kavitetssår og fistler, så den er nem at fjerne igen.
 7. Anvend en passende sekundærbandage*.
 8. Bandagens skiftefrekvens afhænger af sårets ekssudat-niveau samt sårets og den raske huds generelle tilstand. Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.
- Klinikere bør sikre, at produktet anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger.*

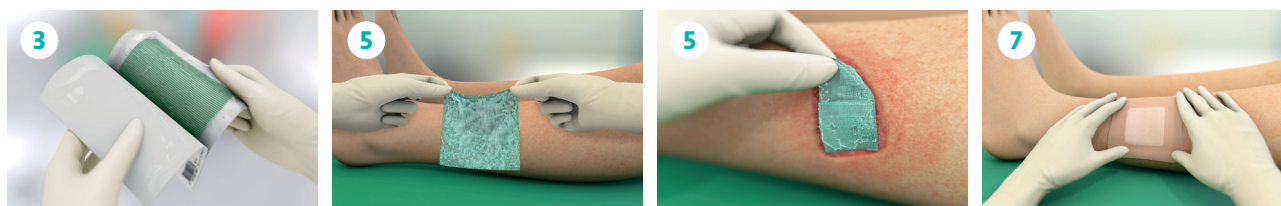

*Fx Sorbact® Surgical Dressing, Sorbact® Foam Gentle Border eller Sorbact® Foam Dressing.
Ved brug af Sorbact® som sekundærbandage beskyttes den raske hud.

PRODUKTSTØRRELSER

Produkt	Varenr.	Størrelse	Antal/æske
Sorbact® Gel Dressing	98136	7,5 x 7,5 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98139	3 x 15 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98137	7,5 x 15 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98180	15 x 20 cm NY!	5
Sorbact® Gel Dressing	98181	20 x 25 cm NY!	5

Sorbact® er en svensk innovation og sortimentet af sårbandager sælges via ABIGO partnere og forhandlere i mere end 65 lande over hele verden. I visse regioner sælges Sorbact® som Cutimed® Sorbact® og Leukomed® Sorbact®. Find din lokale forhandler på abigo.com. Sorbact® er et registreret varemærke, der ejes af ABIGO Medical AB.



ABIGO Pharma A/S · Stengårdsvej 25 · 4340 Tølløse
T: 4649 8676 · info@abigo.dk